


A1Mini® Kondomwerbung - Mindesthaltbarkeitsdatum:
siehe Kondomaufrdruck
(sollte das Datum überschritten sein, bitte nicht verwenden)


Hinweise zur Anwendung

- 1.** Reißen Sie die Versiegelung an der Seitenkante vorsichtig auf. Achten Sie dabei darauf, das Kondom nicht mit scharfkantigen Gegenständen wie z.B. Ringen oder Fingernägeln zu beschädigen.
- 2.** Halten Sie das Reservoir an der Spitze des Kondoms so mit Daumen und Zeigefinger, dass dort kein Luftpolster entsteht.
- 3.** Damit das Kondom vor sexuell übertragbaren Krankheiten und Schwangerschaft schützen kann, rollen Sie das Kondom vollständig über den steifen Penis ab, bevor es zur ersten Berührung zwischen Penis und Vagina kommt.
4. Ziehen Sie den Penis nach dem Samenerguss langsam und vorsichtig aus der Scheide, bevor der Penis erschlafft. Halten Sie dabei das Kondom an der Peniswurzel fest.

1.

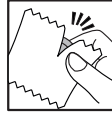

2.

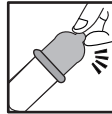

3.



Zusätzliche Gleitmittel

Vorsicht bei der Verwendung von Gleitmitteln!
Die Anwendung von Vaseline oder fetthaltigen Gleitmitteln wie Babyölen, Körperlotionen oder auch Speisefetten können das Kondom beschädigen. Verwenden Sie nur Gleitmittel, die ausdrücklich für den Gebrauch mit Latexkondomen erlaubt werden.

Wichtiger Hinweis

Das gebrauchte Kondom gehört in den Abfalleimer und nicht in die Toilette!

Verwenden Sie Kondome immer nur einmal!
Kondome erzeugen grundsätzlich keine Nebenwirkungen. Sollten dennoch Unverträglichkeitsreaktionen (z.B. Latexallergie) auftreten, fragen Sie bitte Ihren Arzt um Hilfe. Bei gleichzeitiger äusserlicher Anwendung von rezeptpflichtigen oder rezeptfreien Medikamenten an Penis oder Vagina, konsultieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker über deren Verträglichkeit mit Kondomen. Kein Verhütungsmittel kann einen 100%-igen Schutz vor Schwangerschaft oder Infektionen garantieren. Bei richtiger Anwendung bieten Kondome einen sicheren Schutz vor sexuell übertragbaren Krankheiten wie AIDS.

